

SL - KONCENTRACIJE ZA PRES KERAMIKU ZA INTERPRESS SPEED / EN - CONCENTRATION FOR PRESS CERAMIC FOR INTERPRESS SPEED / ES- CONCENTRACIÓN PARA CERÁMICA PENSADA PARA INTERPRESS SPEED / HR - KONCENTRACIJE ZA PRES KERAMIKU ZA INTERPRESS SPEED / SR - KONCENTRACIJE ZA PRES KERAMIKU ZA INTERPRESS SPEED / CS - KONCENTRACE PRO PRESS KERAMIKU PRO INTERPRESS SPEED / MK- COOДHOC ZA MEШAWE ZA ПPЕCC ПOPЦЕЛАН ЗА ИНТЕРПPЕСС СПЕЕД/ RU - КОНЦЕНТРАЦИИ INTERPRESS SPEED ДЛЯ ПPЕСС КЕРАМИКИ / KZ - ПPЕСС КЕРАМИКАҒА АPНAЛҒАН INTERPRESS SPEED ШOҒЫPЛАНУЫ

		200 g kiveta / 50 ml tekočine 200 g muffle / 50 ml liquid 200 g mufla/ 50 ml liquido 200 g kiveta / 50 ml tekučine 200 g kiveta / 50 ml tečnost 200 g kroužek / 50 ml tekutiny 200 г кивета / 50 мл течност 200 г Опока / 50 мл жидксти 200 г Опок / 50 мл сұйықтық		100 g kiveta / 25 ml tekočine (možnost samo enega objekta v kiveti) 100 g muffle / 25 ml liquid (only one object possible inside the muffle) 100 g mufla / 25 ml liquido (solo un objeto dentro de la mufla) 100 g kiveta / 25 ml tekučine (mogućnost samo jednog objekta u kiveti) 100 g kiveta / 25 ml tečnosti (mogućnost jednog objekta u kiveti) 100 g kroužek / 25 ml tekutiny (pouze jeden objekt v kroužku) 100 г кивета / 25 мл течност (со еден объект во кивета) 100 г опока / 25 мл жидксти (возможен только один объект в опоке) 100 г опок / 25 мл сұйықтық (опокта тек бір затқа болуға болады)
INDIKACIJE / INDICATION / INDICACIÓN / INDIKACIJE / INDIKACIJE / INDIKACE / ИНДИКАЦИИ	Expasol	Destilirana voda / Distilled water / Agua destilada / Destilirana voda / Destilovana voda / Destilovaná voda / Destilirana voda /Дистиллированная вода / Дистилденген су	Expasol	Destilirana voda / Distilled water / Agua destilada / Destilirana voda / Destilovana voda / Destilovaná voda / Destilirana voda / Дистиллированная вода / Дистилденген су
Luska / Veneers / Carillas / Ljuska / Ljuska / Fazety / Ламинати	50 % (25 ml)	50 % (25 ml)	65 % (16 ml)	35 % (9 ml)
Inlej / Inleys / Inleys / Inlej / Inlej / Inleje / Inlei / Инлеус / Инлей	45 % (22,5 ml)	55 % (27,5 ml)	60 % (15 ml)	40 % (10 ml)
Onleji / Onleys / Onleys / Onleji / Onleji / Onleje / Онлеи / Онлей / Онлей	65 - 70 % (32,5 ml - 35 ml)	35 - 30 % (17,5 ml - 15 ml)	85 - 90 % (21,3 ml - 22,5 ml)	15 - 10 % (3,7 ml - 2,5 ml)
Krone, MOD Inleji / Crowns, MOD Inleys / Coronas, MOD Inleys / Krunice, MOD Inleji / Krune, MOD Inleji / Korunky, MOD Inleje / Коронки, МОД инлеи / Коронки, МОД Инлеи	60 % (30 ml)	40 % (20 ml)	75 % (19 ml)	25 % (6 ml)
Overpress tehnika (krone, mostički) / Overpressing technique (crowns, bridges) Técnica de sobreprensado (coronas, puentes) / Overpress tehnika (krunice, mostovi) / Overpress tehnika (krune, mostovi) / Presovací technika (korunky, můstky) / Оверпресс техника (коронки; мостови) / Техника напрессовывания (коронки и мосты) / Қысу техникасы (тіс қаптамасы және дәнекер)	60 % (30 ml)	40 % (20 ml)	75 % (19 ml)	25 % (6 ml)
Končna temperatura je odvisna od izbire peletov: (Vita in Ivoclar: 850 °C) / The final preheating temperature depends on the pellets: (Vita and Ivoclar: 850 °C) / La temperatura final de precalentamiento depende de las pastillas(Vita e Ivoclar: 850 °C) / Konačna temperatura ovisi o izboru peleta: (Vita i Ivoclar: 850 °C) / peći: (Vita in Ivoclar: 850 °C) / Vyhřívací teplota je závislá na volbě pelet: (Vita a Ivoclar: 850 °C) / Конечната температура зависи од таблетите: (Вита и Ивоцлар 850 °C) / Конечная темпеатура зависит от выбора таблеток: (Vita and Ivoclar: 850 °C) / Соңғы температура дәрумендердің таңдауынан тәуелді: (Vita және Ivoclar: 850 °C)				
Čas v peći na končni temperaturi / Time in the furnace at the final temperature / Tiempo en el horno en la temperatura final / Vrijeme u peći na konačnoj temperaturi / Vreme u peći na konačnoj temperaturi Čas v peći při konečné teplotě / Времетраење на крајната температура / В печи на конечной температуре / Пеште соңғы температурада	100 g kiveta: najmanj 50 minut / 100g muffle: at least 50 minutes / 100 g mufla: por lo menos 50 minutos / 100 g kiveta: najmanje 50 minut / 100 g kiveta: najmanj 50 minut / 100 g kroužek: nejméně 50 minut / 100 г кивета: најкратко 50 минути / 100 г опока: минимум 50 минут / 100 г опок: кемінде 50 минут:			
	200 g kiveta: najmanj 75 minut / 200 g muffle: at least 75 minutes / 200 g mufla: por lo menos 75 minutos / 200 g kiveta: najmanje 75 minut / 200 g kiveta: najmanj 75 minut / 200 g kroužek: nejméně 75 minut / 200 г кивета: најкратко 75 минути / 200 г опока: минимум 75 минут / 200 г опок: кемінде 75 минут			
Če žarimo večjo količino kivet, moramo čas v peći na končni temperaturi podaljšati. / If you have more muffles inside the furnace, the time at the final temperature in the furnace must be increased. / Si usted tiene más de una mufla dentro del horno, el tiempo en la temperatura final en el horno se debe de aumentar. / Ako žarimo veću količinu kiveta moramo vrijeme u peći na konačnoj temperaturi produžiti. / Ako žarimo više kiveta moramo produžiti vreme u peći na konačnoj temperaturi. / Pokud jsou další kroužky uvnitř pece, čas v peći musí být prodloužen. / Доколку имате повеќе кивети во печката, времетраењето на задржување на температурата мора да се зголеми. / Если в печи большое количество опок, то конечную температуру печи необходимо продлить. / Егер пеште опок көп болса, онда пештің соңғы температурасын оздыру қажет.				